

**ANLEITUNG ZUR FIXATION
VON
BRONCHIAL-
BÜRSTUNGEN, -SEKRETEN UND -LAVAGEN
FÜR ZYTOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN**

1. BÜRSTUNGEN

- Zellmaterial durch Abrollen der Bürste gleichmäßig und dünn auf ein bis zwei Objektträger übertragen. Bei reichlich Zellmaterial dieses ggf. durch Auflegen eines weiteren Objektträgers und Auseinanderziehen der beiden weiter verteilen. Zellausstriche nicht antrocknen lassen, sondern sofort aus ca. 20 cm Entfernung satt mit Fixations spray (z. B. Merckofix®) einsprühen. Bei Zimmertemperatur antrocknen lassen und in Versandmappen oder anderen bruch sicheren Behältnissen versenden. Auf dem Einsendungsschein bitte „Spray-Fixation“ ankreuzen.
- Alternativ kann die Bürste in Versandgefäßen mit 50 %igem Alkohol oder dem von uns gelieferten Saccomanno's Fixativ ausgeschüttelt werden. Einmalbürsten können auch abgeschnitten in Fixativ eingeschickt werden.

2. SEKRETE

- Ein bis zwei Tropfen direkt zwischen zwei Objektträgern dünn ausstreichen und sofort aus ca. 20 cm Entfernung mit reichlich Fixations spray (z. B. Merckofix®) bedecken.
- Größere Mengen in reichlich (mindestens dem vierfachen Volumen) 50 %igem Alkohol bzw. dem von uns gelieferten Saccomanno's Fixativ suspendieren und in gut verschlossenem Versandröhrchen einsenden.

3. LAVAGEN

- Geringe Mengen (<10 ml) sofort in reichlich (mindestens dem vierfachen Volumen) 50 %igem Alkohol bzw. in dem von uns gelieferten Saccomanno's Fixativ suspendieren und in gut verschlossenem Versandröhrchen einsenden.
 - Größere Mengen (>10 ml) sogleich nach Entnahme für 5 Minuten bei 300 g/min zentrifugieren. Überstand absaugen oder dekantieren. Sediment in 50 %igem Alkohol oder Saccomanno's Fixativ suspendieren und in gut verschlossenem Versandröhrchen einsenden.
- Bitte verwenden Sie für den Postversand ausschließlich unsere bruch- und auslaufsicheren Versandgefäße mit Umverpackung und unserem Versandkarton.

Wenn Sie Fragen haben, Versand- und Verpackungsmaterial oder Zytologie-Einsendungsformulare benötigen, so wenden Sie sich bitte an uns:

Zentrum für Pathologie
Funktionsbereich Cytopathologie
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Leitung: Dr. M. Schramm/ Dr. (UA) N. Pomjanski
Postfach 10 10 07
40001 Düsseldorf

Telefon: (0211) 81-18346
Befundauskunft: (0211) 81-19524/19521
Telefax: (0211) 81-18402

Gebäudenummer: 14.81