

## PRÄPARATIONSANLEITUNG FÜR DIE HARNBLASENSPÜLZYTOLOGIE

1. Harnblase entleeren lassen.
2. Ca. 100 ml sterile physiologische Kochsalzlösung 10 x instillieren und wieder aspirieren.
3. Gesamte Spülflüssigkeit sofort 5 Minuten bei 300 g/min zentrifugieren.
4. Überstand bis auf ca. 0,5 ml abpipettieren oder dekantieren.
5. Sediment mit mindestens der vierfachen Menge 50 %igem Alkohol oder mit Saccomanno's Fixativ versetzen und zum Versand bringen.
6. Bitte verwenden Sie nur unsere bruch- und auslaufsicheren 50 ml-Versandgefäße mit blauem Deckel und blaue, wasserdichte Umschläge für den Postversand.

Wenn Sie Fragen haben, Versand- und Verpackungsmaterial oder Zytologie-Einsendungsformulare benötigen, so wenden Sie sich bitte an uns:

Zentrum für Pathologie  
Funktionsbereich Cytopathologie  
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  
Leitung: Dr. M. Schramm/ Dr. (UA) N. Pomjanski  
Postfach 10 10 07  
40001 Düsseldorf  
Homepage: <http://www.med.uni-duesseldorf.de/CytoPathologie/index.html/>

Telefon: (0211) 81-18346  
Befundauskunft:(0211) 81-19524  
Telefax: (0211) 81-18402

Gebäudenummer: 14.81