

# Untersuchungsauftrag

## Anwendung:

1. **Patienten-Barcode-Etikett (Medico oder Labor)** aufkleben
2. ggf. **Einsenderetikett** aufkleben
3. Untersuchungen markieren (z. B. schwarzer Filzstift)
4. Erforderliche **Probenetiketten** mit Patientennamen versehen
5. **Probenetiketten** mit rotem Pfeil nach oben auf Röhrchen kleben, obere Etikettenkante direkt unterhalb Stopfen  
Probengut muß gut sichtbar bleiben
6. Nach Probennahme ggf. Abnahmezeit markieren, Untersuchungsauftrag unterschreiben (Ärztin/Arzt)

**Proben-Etiketten** mit Patientennamen beschriften und auf zugehöriges Röhrchen kleben (Nummer aufrecht, Etikettoberkante direkt unter Röhrchenstopfen)

**medico- oder Labor-Patienten-Barcode-Etikett**

**Barcodes genau auf rote Barcode-Symbole kleben!**

**Einsender-Etikett optional**

**Barcode-Lesespur**

**Serumröhrchen**

**EDTA-Röhrchen**

**Citrat-Röhrchen**

**Urin-Röhrchen**

**Bitte niemals Patienten-Barcode auf Röhrchen kleben!**