


Proben-transporthüllen


Sogenannte Transport-Doppeltaschen erlauben den gemeinsamen Transport von Anforderungsscheinen und den zugehörigen Proben.

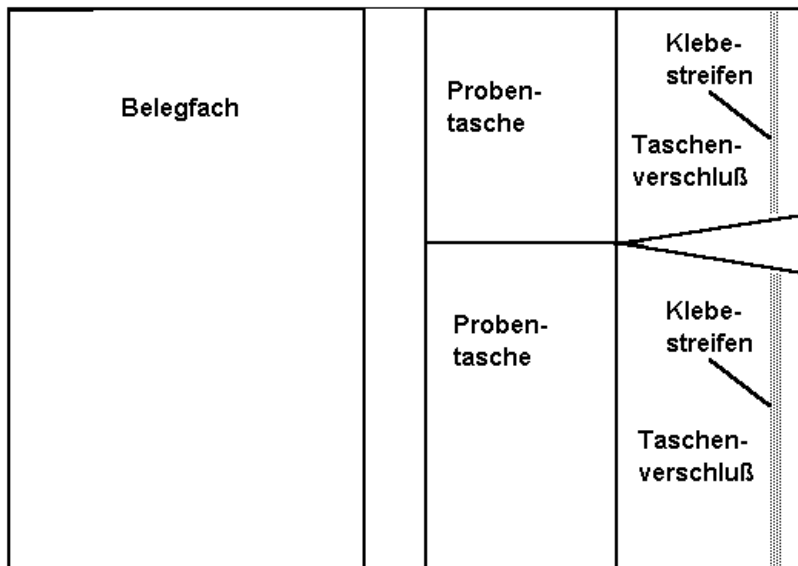

Die Hüllen bestehen aus einem **Belegfach** für den Anforderungsschein und **Proben-taschen** für die zugehörigen Proben. Die Taschen müssen für den Transport verschlossen werden.

Beachten Sie bitte folgende **Anwendungshinweise**:

1. Anforderungsschein und Proben korrekt **identifizieren** (Patient, ggf. Station/Ambulanz)
2. Jeweils **einen** Anforderungsschein in das **Belegfach** stecken
3. Nur die **zugehörigen Proben** in die **Proben-taschen** legen.
4. **Rote Schutzfolie** vom Klebestreifen **lösen**.
5. Mit dem **Taschenverschluss** Proben-tasche so **schließen**, daß der **Klebestreifen über der Proben-tasche** klebt und die **Proben nicht herausfallen** können.

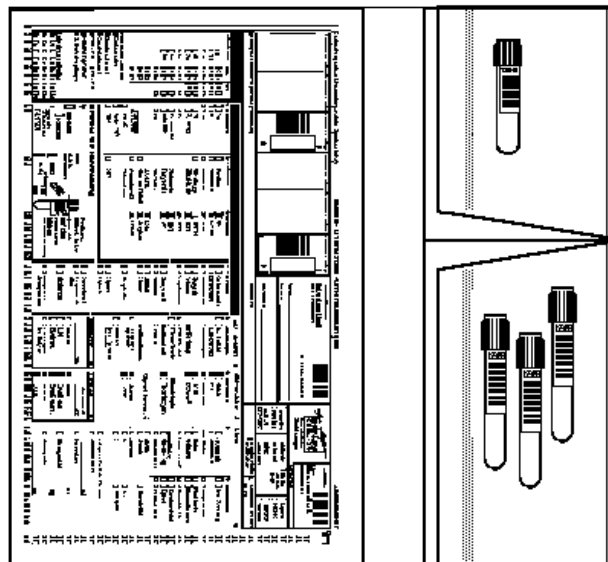

Klebestreifen nicht auf das Belegfach oder auf die Hüllen-Rückseite kleben!

Anschließend können Proben-taschen über das Belegfach geklappt werden.

Bitte immer nur einen Schein mit Proben in eine Hülle stecken, da andernfalls Verzögerungen (auch von Notfall-Analysen!) unvermeidbar sind.

Hinweis: Transport Doppeltaschen sind über den Barcode-Anforderungsschein Büromaterial im Zentrallager erhältlich (SAP-Nr. 3201118).