


## Probentransporthüllen

Sogenannte Transport-Doppeltaschen erlauben den gemeinsamen Transport von Anforderungsscheinen und den zugehörigen Proben. Die Hüllen bestehen aus einem

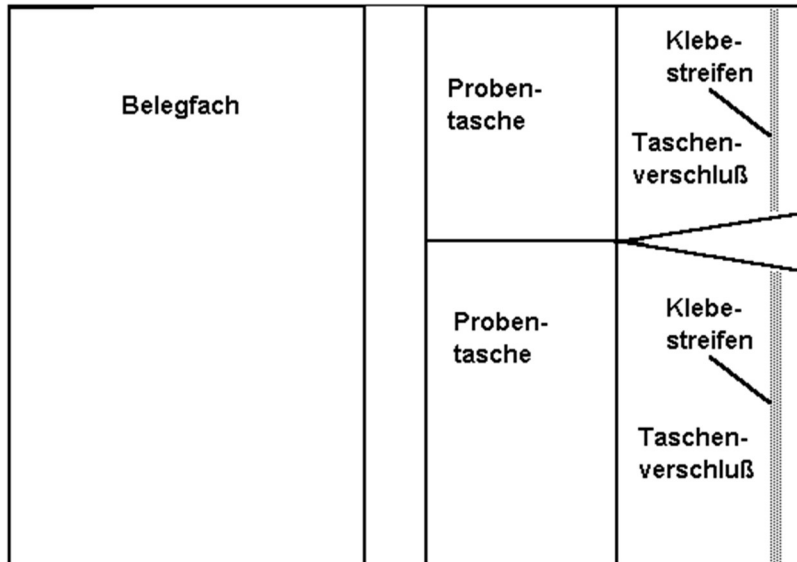

Jeweils einen Anforderungsschein in das Belegfach stecken

Nur die zugehörigen Proben in die Probentaschen legen.

**Rote Schutzfolie** vom Klebestreifen lösen.

Mit dem **Taschenverschluß** Probentasche so **schließen**, daß der **Klebestreifen über der Probentasche** klebt und die **Proben nicht herausfallen** können.

Klebestreifen nicht auf das Belegfach oder auf die Hüllenrückseite kleben!

Anschließend können Probentaschen über das Belegfach geklappt werden.

Bitte immer nur **einen Schein** mit Proben **in eine Hülle** stecken, da **andernfalls Verzögerungen** (auch von Notfall-Analysen!) unvermeidbar sind.

Hinweis: Transport Doppeltaschen sind über den Barcode-Anforderungsschein Büromaterial im Zentrallager erhältlich (SAP-Nr. 3201118).

**Belegfach** für den Anforderungsschein und **Probentaschen** für die zugehörigen Proben. Die Taschen müssen für den Transport verschlossen werden.

Beachten Sie bitte folgende **Anwendungshinweise**:

Anforderungsschein und Proben korrekt **identifizieren** (Patient, ggf. Station/Ambulanz)

